

LUNINOUS GINGIVA CLEAR GEL

Буйлнаас гарсан цусыг тогтоогч Гел
Энэ бол онцгой наалдамхай материал.

Буйлыг агшаах, буйлнаас гарсан цусыг гайхалтай үр дүнтэй тогтооно.

Үүдэн шүд соёоны орчмын протез хийхэд ашиглахад зохимжтой.

Шүдний нүхийг дүүргэж ломбодон байгалийн шүдийг сэргээн босгох
30 секундээс нэг минутын дотор буйлнаас гарч байгаа цусыг тогтооно.

Дорхноо хатуурч шүд босгоход тус болно. Ялангуяа үүдэн шүд болон соёо орчмын протез хийхэд тохиромжтой.

25% Aluminum Chloride Hexohydrate агуулах тул буйлны агшилтыг сайжруулж коллаген ширхэг нь хялгасан судсыг бөглөн цус тогтооно.

Найрлаганд нь байдаг Madecacin ба Centella Asiatica –нь шархны эдгэрэлтийг түргэсгэж үрэвслийн намдаах үйлчилгээ үзүүлнэ



Хэрхэн хэрэглэх вэ?

1. Эмчилж байгаа эдийг нөхөхөд зохих хэмжээний материалыг сонгож тэгшилж дүүргэх
2. 30 секундээс 1 минут хүлээсний дараа цус алдалт зогсоно.
3. Эмчилгээ усаар цэвэрлээд нүхийг бөглөж хатахийг нь хүлээнэ.