


KDT-У

Цахилгаан төрөх ор

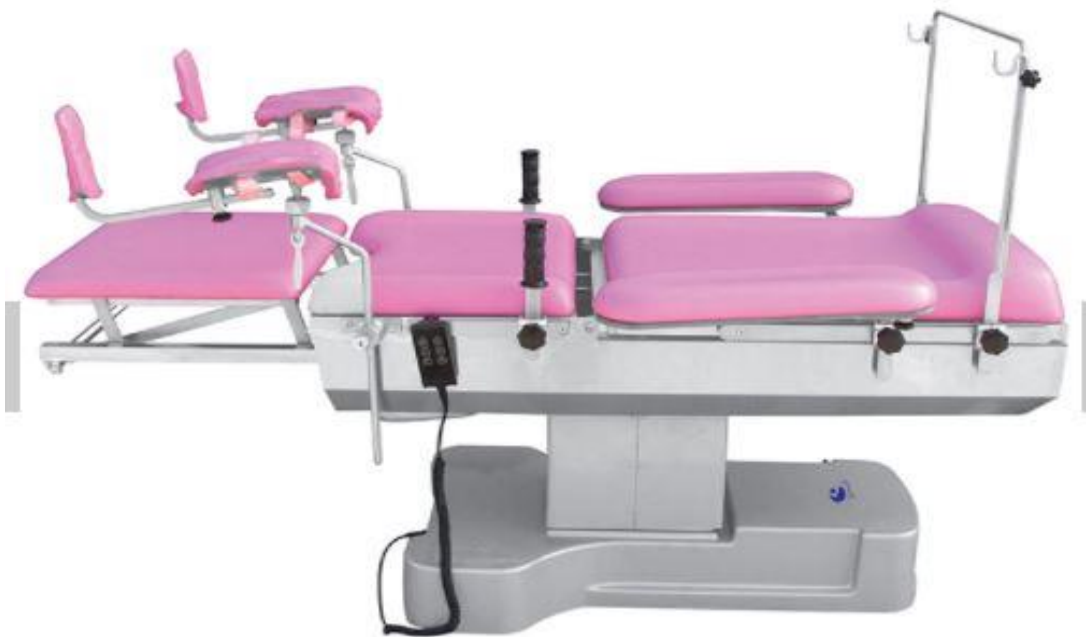

Хэрэглэгчийн гарын авлага

Ашиглах чиглэл

Тэмдэг	Заавар	Тэмдэг	Заавар
Асаах товчлууур	Off унтраах	I	ON асаах
Up	Дээш өргөх	Down	Доошлуулах
Back up	Дэрийг өргөгдөх	Back down	Дэрийг доошлуулах

Суурилуулах зааварчилгаа

1.Хайрцагыг онгойлгосны дараа тоосноос хамгаалах бүтээлэгийг авч Төрөх орыг хайрцагнаас гаргаж авна.Эхлээд гаднах байдал, Гарын авлага,чанарын гэрчилгээ, баглаа боодол, барааны бичиг жагсаалтын дагуу дагалдах хэсгүүд бүрэн эсэхийг хянаж шалгана.Хэрэв асуудал гарвал үйлдвэрлэгчтэй холбоо барина уу.

2. Төхөөрөмжийг Орчны шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгасны дараа Төрөх орыг Тэгш гараргуу дээр байрлуулж, Туршиж үзэхийн өмнө 5 минут дулаан газар байлгана.

3.Төрөх орыг суурилуулах ажиллагааг орны хажууд буй хайрцагт хийсэн зааврын дагуу гүйцэтгэнэ.

4. Төхөөрөмж нь 10А аас дээш чадалтай сайн залгуурт холбох хэрэгтэй.

(2) Зааварчилгаа

1.Орчны хог хаягдалыг цэвэрлээд асаах товчыг дарна.

2.Гар болон хөл удирдлагаар зурагт үзүүлсэний дагуу дээш нь өргөх, доош нь буулгах зэргээр хүний биеийг шаардлагатай байрлалд тохируулж болно.

3. Энэхүү төрөх ор нь Явах хөдлөхөд зориулагдсан эд ангитай ба урд хэсэгтээ хөл тавих хэрэгсэлтэй ба ашиглахын өмнө дөрөөг нь хөл тавихад эвтэйхэн байрлалтайгаар байршуулан буцааж түгжинэ