

Luminous Multi-Boost Plus



Энгийн, үр дүнтэй

Шүд цайруулна, өнгөлнө.

Зөвхөн шүд цайруулах төдийгүй шүдний пааланг бэхжүүлнэ. Кальц дутагдсан шүдний гадаргууны минералжих процессийг идэвхжүүлнэ.

- Шингэн хэлбэр -50гр савлагаатай, холигч халбага
- Гель-Хэлбэр-1 гр савлагаатай. Холигч халбага, хөвөн түүдэг,
- Бүх бүтээгдэхүүнүүд ус төрөгчийн хэт исэл /перекис водород / H_2O_2 –г агуулна.

Хэрэглэх арга

1. Шүдийг цэвэрлэсний дараа буйл ба уруулд гель түрхэнэ.
2. Ус төрөгчийн хэт исэл, цайруулагч материалыг 1:1 харьцаатай холино.
3. 15-20 удаа холигч халбагаар аажмаар хутгана.
4. Холигч ба сойзын тусламжтайгаар шүдэн дээр зузаан түрхэнэ.
5. 20-30 минут тутамд ажилбарыг 2 удаа давтана.